

Applicazione dell'anello Dansac TRE™



Stoma
Skin
Soul



Applicazione dell'anello Dansac TRE



Per ulteriori informazioni, visitare www.dansac.ch.

AVVERTENZE: il riutilizzo di un prodotto monouso può essere fonte di potenziali rischi per l'utilizzatore, come una minore aderenza. Rilavorazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere il prodotto. Ciò potrebbe tradursi in cattivi odori o perdite.

NOTE: La preghiamo di notare che questo opuscolo raffigura diverse persone che usano il prodotto. Per assicurare un'adeguata aderenza, applichi l'anello sulla pelle pulita, asciutta e intatta. Non usi oli o lozioni. Questi prodotti possono interferire con l'adesione. La vestibilità del prodotto è influenzata da molti fattori, come il sito dello stoma, gli effluvi dello stoma, le condizioni della pelle e i contorni dell'addome. Il prodotto può essere tagliato, allargato o sovrapposto per migliorare l'adattabilità di un sistema di raccolta. Contattare il personale infermieristico dedicato o un operatore sanitario in grado di fornire un aiuto con il sistema di raccolta per stomia o in caso di irritazione cutanea. In caso di gravi lesioni (incidente) correlate all'uso del prodotto, contattare il proprio distributore locale o il produttore, nonché l'autorità competente locale. Per ulteriori informazioni, visitare www.dansac.com/authority o il distributore locale.

Prima dell'uso, legga le istruzioni per l'uso per informazioni sull'uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e altre istruzioni.

Il logo Dansac e TRE sono marchi registrati di Dansac A/S.
© 2021 Dansac A/S

CE

dansac 