



Tecnologia TRE Dansac disponibile...

... Sistema monopezzo nelle varianti piano, convesso e convesso soft per ileostomia e colostomia.



... Anelli modellabili per la protezione della cute. Consentono di compensare eventuali dislivelli e possono essere utilizzati con tutti i sistemi di sacche disponibili.



... Sistema 2 pezzi con placche nelle varianti piane e convesse, abbinabili a tutte le sacche NovaLife 2 e Nova 2 Dansac.



Per maggiori informazioni, visitare
www.dansac.ch

Dansac Svizzera
Liberty Medical Switzerland AG
Bernstrasse 388 • 8953 Dietikon
Tel. 0800 55 38 39
www.dansac.ch

Prima dell'uso, si prega di leggere le istruzioni per l'uso per informazioni sull'uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni.

CE Il logo Dansac, NovaLife e TRE sono marchi registrati di Dansac A/S.
© 2019 Dansac A/S

dansac 
Dedicated to Stoma Care

NOVALIFE

Dispositivo protettivo per la pelle NovaLife TRE

Consigli pratici
per gli utilizzatori



Shelley,
ileostomia dal 2015

dansac 



La barriera protettiva NovaLife TRE può aiutare a farti sentire bene nella tua pelle

Come funziona il dispositivo protettivo TRE

pH **pH**
▲
pH in equilibrio

Per capire come mantenere la pelle sana, è importante rivolgere l'attenzione al pH della pelle e al suo mantello acido.

- Il pH è un valore che indica il grado di acidità o basicità. La superficie della pelle è naturalmente acida e ha un pH compreso tra 4 e 6, il cosiddetto mantello acido. Esso protegge la pelle e possiede proprietà antimicrobiche che la mantengono sana.
- Alcuni fattori, come il sudore o gli effluenti della stomia, possono indebolire il mantello acido della pelle. Il dispositivo protettivo NovaLife TRE è in grado di bilanciare il pH e creare un ambiente delicato sulla pelle, ma ostile all'azione degli enzimi digestivi.

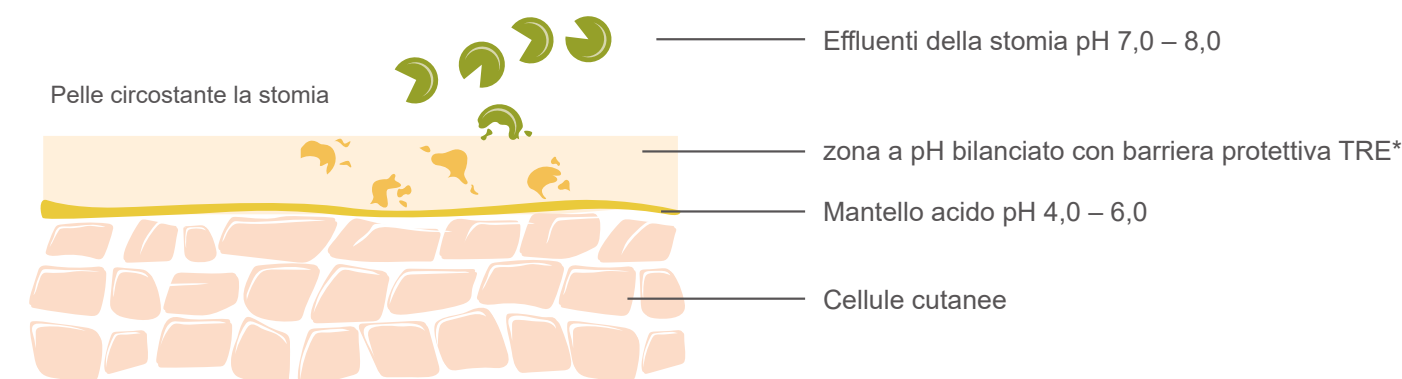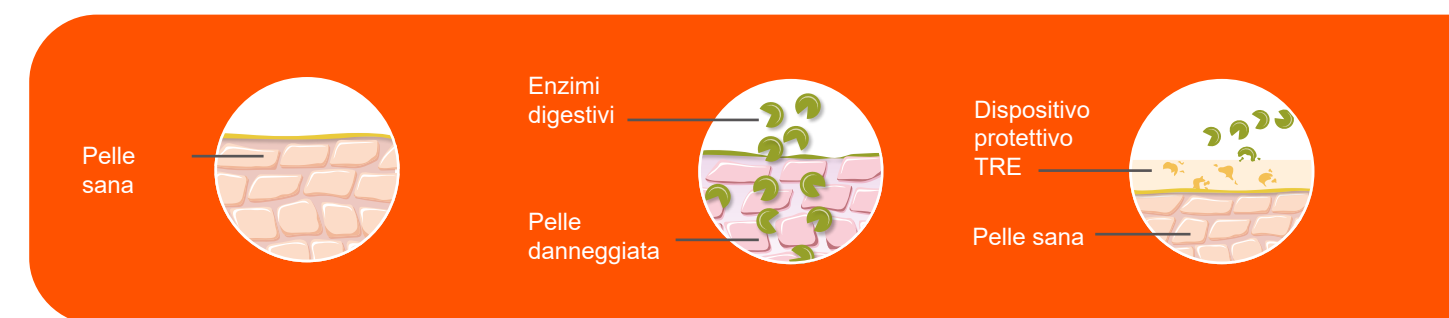

*progettata per aiutare a gestire gli effetti nocivi degli enzimi digestivi sulla pelle

Durante l'applicazione del dispositivo

Adesione

A volte la tenuta dei prodotti per la cura della stomia può destare qualche preoccupazione.

Per aiutarti ad avere meno pensieri la barriera protettiva NovaLife TRE favorisce un'elevata adesione.

- Noterai che la barriera protettiva NovaLife TRE è di colore bianco. Noterai anche che questo dispositivo protettivo è più sottile rispetto alle altre placche NovaLife.
- NovaLife TRE ha una superficie adesione immediata. È progettato per essere flessibile e consentire i naturali movimenti del corpo, per potersi dedicare alle attività piacevoli della vita quotidiana.



Immagine realizzata al computer

Durante l'uso

Assorbimento dell'umidità

Il dispositivo protettivo TRE è stato progettato per assorbire gli effluenti della stomia e il sudore.

- La stomia ha una superficie umida e la pelle secerne sudore attraverso le ghiandole sudoripare.
- Nell'arco della giornata, noterete forse che il bianco del dispositivo diventa più chiaro. Ciò significa che il dispositivo protettivo assorbe l'umidità, senza perdere la sua forma e la forza adesiva.
- Il dispositivo protettivo si gonfia nelle aree con alta umidità. Questo effetto può essere immediatamente evidente intorno alla stomia.

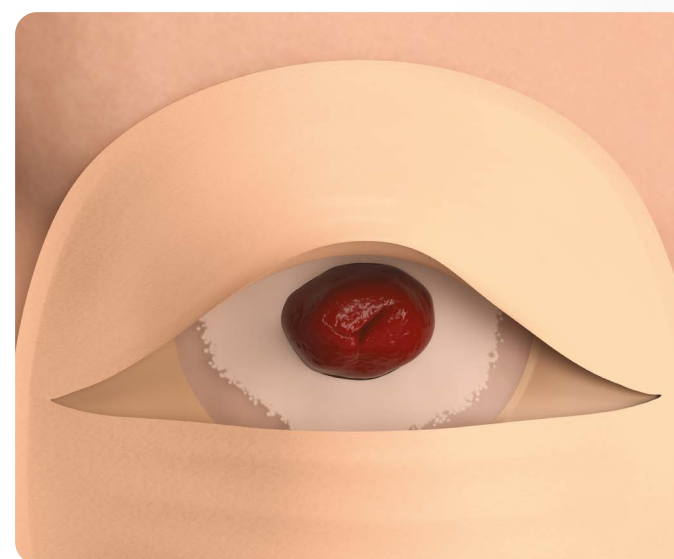


Immagine realizzata al computer

Dopo l'uso

Al momento di cambiare il dispositivo protettivo, noterete che il prodotto è facile da rimuovere, pur avendo mantenuto la sua forma.

- Durante la rimozione del dispositivo protettivo noterete il viraggio di colore che rende visibili le aree con umidità elevata. In questa aree possono essere presenti chiazze bianche.
- Dopo aver pulito e asciugato la stomia, noterete che il dispositivo protettivo ha assicurato un'ottima tenuta sulla pelle circostante.

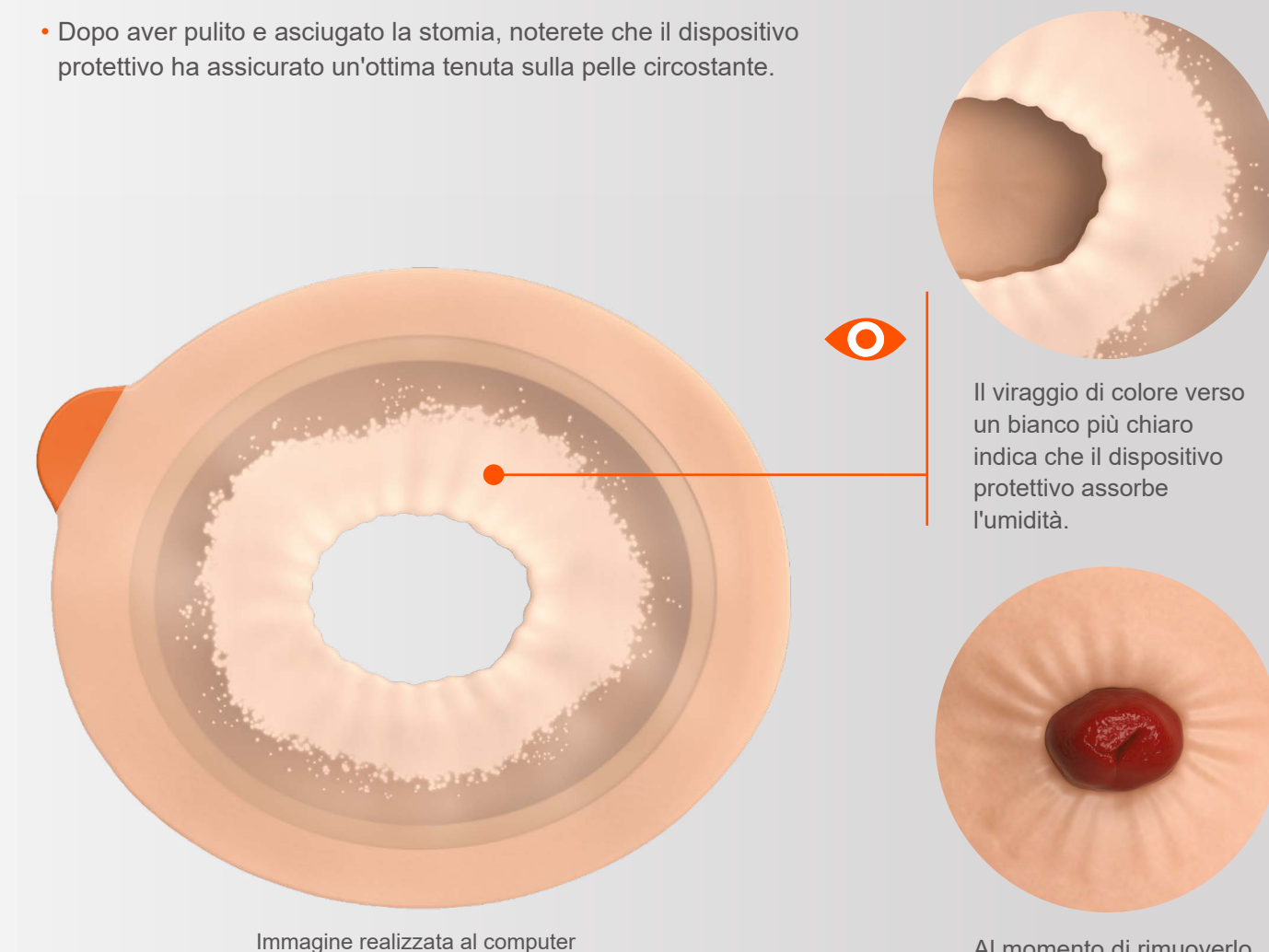


Immagine realizzata al computer

Il viraggio di colore verso un bianco più chiaro indica che il dispositivo protettivo assorbe l'umidità.

Al momento di rimuoverlo, noterete che il dispositivo protettivo flessibile TRE si è adattato ai contorni della pelle peristomale, consentendo i naturali movimenti del corpo.

Con il dispositivo protettivo NovaLife TRE non dovete più preoccuparvi di eventuali problemi cutanei.

Per una pelle naturalmente sana.