


Ulteriore sicurezza

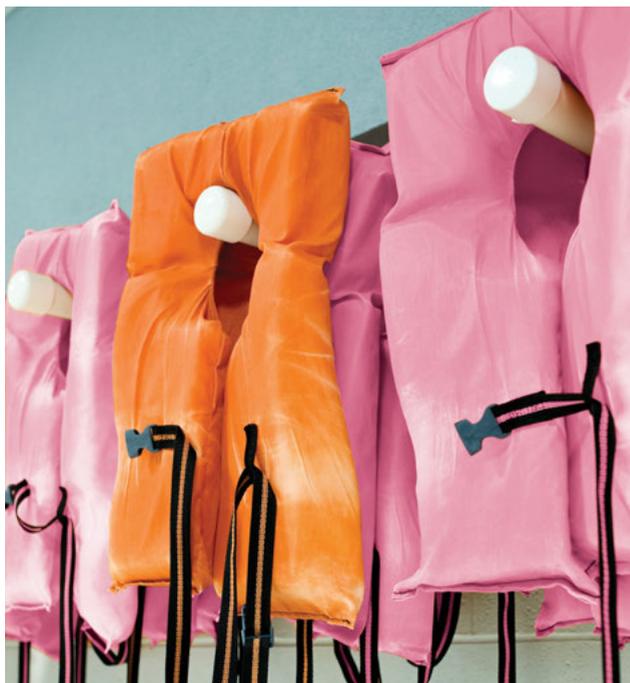

Accessori Dansac

Introduzione

Dansac si è specializzata nello sviluppo dei prodotti per stomia e degli accessori per la cura della pelle, per migliorare la qualità di vita dei pazienti portatori di stomia.

Siccome ogni stomia è diversa dall'altra, è possibile che siano necessari prodotti di cura speciali.

A complemento dei prodotti per stomia, vi offriamo dei prodotti di cura speciali, idealmente coordinati alle prime. Questi prodotti forniscono più comfort e sicurezza nella vita quotidiana.

Questo opuscolo informativo contiene tutti i prodotti attualmente offerti da Dansac. Questi prodotti possono contribuire a prevenire i problemi di secchezza cutanea, irritazioni cutanee e odori sgradevoli.

Ci auguriamo che questo opuscolo risulti informativo e utile.

Il Team Dansac

Contenuto



Dansac Seal Anelli di protezione	4
Dansac GX-tra Seal Anelli di protezione	6
Dansac X-tra Strips	8
Dansac Soft Paste	10
Dansac Solvente per adesivi medicali	12
Dansac Skin Protector	14
Dansac Skin Lotion	16
Dansac Skin Crema	18
Dansac Nodor S.....	20
Annotazioni	22

DANSAC SEAL

ANELLI DI PROTEZIONE

Ulteriore protezione speciale, dove ce n'è più bisogno

Ulteriore protezione speciale, dove ce n'è più bisogno

A causa di pliche cutanee, cicatrici o dislivelli cutanei, a volte può essere difficile realizzare un isolamento sicuro tra cute e stoma. L'eccezionale design degli anelli di protezione con apertura decentrata è l'ideale per il corretto posizionamento, dove è necessaria una protezione speciale. Dansac Seal può essere impiegato sulla pelle o sulla placca di protezione e si può eliminare in maniera semplice e senza lasciare residui.

Grazie alla forma particolare, in cui il materiale di protezione della pelle è distribuito in maniera

non uniforme intorno al centro, è possibile posizionare gli anelli di protezione in maniera che la maggior parte del materiale protettivo della pelle si trovi dove c'è più bisogno di protezione. Gli anelli di protezione Dansac Seal sono disponibili in quattro misure per ciascuna stomia.

Gli anelli di protezione Dansac Seal sono adatti per qualsiasi tipo di stoma. Gli anelli di protezione sono in materiale compatibile con la pelle privo di alcool, con microscopiche fibre di rinforzo. L'anello di protezione di 3 mm si lascia facilmente distendere e tirare di nuovo in forma, senza strapparsi e senza perdere la sua adesività.

Gli anelli di protezione Dansac Seal vengono forniti in confezione singola: una soluzione semplice e a misura di utente, con chiusura a baionetta, facile da aprire, per una conservazione semplificata e per l'uso quotidiano.



DANSAC SEAL

Accessori



Misura anello	Cod. art.	Pezzi
20 mm	070 - 20	30
30 mm	070 - 30	30
40 mm	070 - 40	30
50 mm	070 - 50	30



- Ulteriore protezione speciale
- Apertura decentrata

DANSAC GX-tra **SEAL** ANELLI DI PROTEZIONE

Ulteriore sicurezza contro la mancata tenuta

Ulteriore sicurezza contro la mancata tenuta

I vostri pazienti necessitano di maggiore sicurezza o si preoccupano della mancata tenuta? Gli anelli di protezione Dansac GX-tra Seal possono rappresentare la soluzione ideale. Essi offrono più sicurezza contro la mancata tenuta e allungano inoltre la durata d'uso.

Gli anelli di protezione Dansac GX-tra Seal sono la soluzione ideale ad esempio per stomie retratte o per compensare dei dislivelli cutanei e per proteggere la pelle dalle secrezioni aggressive.

È possibile allungare e conformare l'anello di protezione GX-tra Seal, in maniera che si adatti perfettamente a ogni misura o forma dello stoma. Spezzettare l'anello in piccole parti per compensare i dislivelli cutanei. Non appena risulta una superficie piana, sistemare la stomia come di consueto mediante l'anello di protezione. È possibile anche fissare l'anello direttamente sulla protezione della pelle.

Gli anelli di protezione GX-tra sono in idrocolloide GX ipoallergenico con fibre di cotone. Le fibre di cotone contribuiscono ad allungare la durata d'uso, trattenendo l'umidità e ritardando lo scioglimento dell'idrocolloide. Gli anelli di protezione non contengono alcool e proteggono, quindi, anche la pelle sensibile.



DANSAC GX-tra **SEAL** ANELLI DI PROTEZIONE

Accessori



Misura anello	Cod. art.	Pezzi
20 mm	725 - 20/30	30
30 mm	725 - 30/30	30
40 mm	725 - 40/30	30
50 mm	725 - 50/30	30



- Sicurezza contro la mancata tenuta
- Maggiore durata d'uso

DANSAC X-TRA STRIPS

Ulteriore protezione per una maggiore autostima



Ulteriore protezione per una maggiore sicurezza di sé

Per chi desidera una maggiore protezione sui bordi di una stomia, le strisce Dansac X-tra Strips rappresentano una nuova flessibile soluzione. Possono essere fissate sul margine della protezione della pelle e si adattano senza problemi alle forme e ai contorni irregolari del corpo.

Le strisce Dansac X-tra Strips offrono una maggiore affidabilità, grazie all' aumentata sicurezza.

DANSAC X-TRA STRIPS

Accessori

Cod. art.	Pezzi
075-30	30



- Buona conformazione, che si adatta perfettamente ai margini di ogni protezione della pelle
- Offre inoltre protezione contro le perdite
- Illimitata libertà di movimento

DANSAC SOFT PASTE

Per compensare i dislivelli cutanei

Per compensare i dislivelli cutanei

Non è inconsueto che intorno allo stoma siano presenti pliche e dislivelli cutanei. Questi possono rendere difficile l'adesione sicura ed ermetica degli accessori della stomia.

Dansac Soft Paste è ideale per livellare le pieghe cutanee e le cicatrici, consente una sicura applicazione dei dispositivi. La pasta aiuta a proteggere la cute peristomale, prevenendo le infiltrazioni e prolungando la tenuta del dispositivo.

Applicare la pasta sulla pelle asciutta o direttamente sulla placca di protezione della pelle. Con le dita asciutte o con una spatola, la pasta può essere quindi distribuita o modellata nella forma desiderata, per ottenere una superficie liscia. Lasciar asciugare circa 30 secondi prima di applicare il dispositivo. In questo modo, l'alcool evapora e impedisce una sensazione sgradevole sulla pelle irritata.

Dansac Soft Paste può essere impiegato anche assieme agli anelli di protezione, quali Dansac GXtra Seal o Dansac Seal.



DANSAC SOFT PASTE

Accessori

Contenuto	Cod. art.
14.2 g	77514 - 2
50.0 g	77550 - 0



- Contribuisce a compensare i dislivelli cutanei presenti intorno alla stomia
- Protegge la pelle

DANSAC EasySpray™ **SOLVENTE PER ADESIVI MEDICALI** Rimozione rapida e delicata degli accessori



Rimozione rapida e delicata degli accessori

Il solvente per adesivi medicali Dansac contribuisce alla rimozione rapida e indolore dei dispositivi per stomia.

Siccome il solvente per adesivi medicali Dansac è una soluzione senza alcool a base di silicone, non brucia nemmeno sulla cute lesa. Il solvente scioglie il collante in eccesso e facilita la rimozione rapida e semplice della placca di protezione della pelle.

Il solvente per adesivi medicali Dansac è disponibile come spray (50 ml) o come pratiche salviette monouso.

I prodotti possono essere usati singolarmente o combinati assieme: utilizzare lo spray per asportare la protezione della pelle e le salviette per eliminare eventuali residui. Le salviette monouso sono pratiche e discrete soprattutto fuori casa.

DANSAC **SOLVENTE PER ADESIVI MEDICALI**

Accessori

	Cod. art.	Pezzi/contenuto
Salviette	082 - 30	30 Stück
Spray	083 - 01	50 ml



- Spruzzare da ogni angolo (360°)
- Non brucia
- Rapida e semplice rimozione degli accessori

DANSAC SKIN **PROTECTOR**

SALVIETTA PROTETTIVA E IGIENICA

Ulteriore sicurezza per la pelle



DANSAC SKIN **PROTECTOR**

Accessori

Cod. art.	Pezzi
081-30	30



- Protegge la pelle delicatamente dalle secrezioni della stomia e dai collanti

Ulteriore sicurezza per la pelle

L'efficace protezione contro le irritazioni cutanee peristomali e le lesioni cutanee meccaniche è essenziale per il mantenimento di una cute sana. Dansac Skin Protector è la scelta ideale per rendere la vita quotidiana più comoda e sicura.

Le salviette Dansac Skin Protector sono salviette protettive a base di silicone e senza alcool, confezionate singolarmente e semplici da utilizzare.

DANSAC SKIN LOTION

Ottimale detersione
della pelle che circonda la stomia

Delicata detersione della cute peristomale

In generale, l'acqua è sufficiente per la detersione della pelle che circonda la stomia. A volte però non è disponibile acqua pulita o la pelle necessita di una maggiore cura. Dansac Skin Lotion è una delicata lozione detergente, utilizzata e apprezzata da oltre 20 anni. L'ideale per la detersione della cute peristomale

Versare Dansac Skin Lotion su un panno morbido e pulire la cute peristomale. Prima dell'applicazione del dispositivo, la pelle va asciugata tamponando con una compressa.

Dansac Skin Lotion è disponibile in flacone da 200 ml e da 50 ml e come salviette umidificate.



DANSAC SKIN LOTION

Accessori

Contenuto	Cod. art.	Pezzi
50 ml	70005 - 0001	
200 ml	70000 - 0000	
Salviette	71000 - 0000	50
	71000 - 0010	10



- Detersione della cute peristomale
- L'acqua non è necessaria

DANSAC SKIN CREME

Ulteriore umidità per la pelle

Previene secchezza cutanea e irritazioni

La cute peristomale, a volte, risulta essere secca anche quando si usano placche e barriere protettive di ultima generazione, delicate sulla pelle. Utilizzando Dansac Skin Creme prima di applicare il dispositivo, si prevengono secchezza ed irritazioni della cute.

La crema che contiene Aloe Vera e le vitamine A, D ed E, ha un effetto idratante e calmante sulla pelle. Dansac Skin Creme non compromette l'adesione della placca sulla pelle perché ha una consistenza non grassa. E' inodore e inodore, contiene parabeni per assicurarne il processo di conservazione.

La crema si assorbe velocemente e lascia la pelle liscia e idratata, pronta per l'applicazione di un nuovo dispositivo.

Dansac Skin Creme è disponibile in flacone da 50 ml e da 100 ml.



DANSAC SKIN CREME

Accessori

Contenuto	Cod. art.
50 ml	085 - 50
100 ml	085 - 00



- Previene secchezza cutanea
- Contribuisce a prevenire le irritazioni cutanee

DANSAC NODOR S

Neutralizza gli odori,
per una maggiore discrezione

Neutralizza gli odori sgradevoli

Versare un paio di gocce di Dansac Nodor S nella sacca, per neutralizzare gli odori fecali. Si riduce al minimo il rischio di odori sgradevoli durante il cambio o lo svuotamento della sacca.

Dansac Nodor S è un prodotto sicuro e innocuo e inodore. E' composto da acqua e da una soluzione contenente alluminio e sali di zinco, le cui molecole assorbono gli odori. Dansac Nodor S è di per sé inodore.

Versare alcune gocce di Dansac Nodor S nella sacca. A seconda della digestione e dell'alimentazione, possono essere eventualmente necessarie un paio di gocce in più per ottenere l'effetto desiderato.

Dansac Nodor S è disponibile in due grandezze - il flacone piccolo da 50 ml è pratico per quando si è fuori casa, il flacone più grande da 250 ml per l'uso a casa.



DANSAC NODOR S

Accessori

Contenuto	Cod. art.
50 ml	080 - 00
250 ml	080 - 01



- Previene gli odori sgradevoli

Accessori Dansac

A volte la cute peristomale richiede maggiore cura e protezione. Dansac offre una gamma completa di accessori per la gestione della stomia per rispondere a queste esigenze specifiche.

Dansac Seal Anelli di protezione

Ulteriore sicurezza, dove ce n'è più bisogno.

Dansac GX-tra Seal Anelli di protezione

Ulteriore sicurezza contro la mancata tenuta

Dansac X-tra Stips

Ulteriore protezione per una maggiore sicurezza di sé

Dansac Soft Paste

Sicurezza garantita. Livella le pieghe cutanee e le cicatrici

Dansac Solvente per adesivi medicali

Rimozione rapida e delicata degli accessori

Dansac Skin Protector

Ulteriore sicurezza per la pelle

Dansac Skin Lotion

Per detergere e calmare la cute peristomale

Dansac Skin Creme

Idratazione profonda

Dansac Nodor S

Neutralizza gli odori, per una maggiore discrezione