

# GUIDA AL CAMBIO – COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA

- Cosa serve**
1. un sacchetto per gettare i rifiuti
  2. panni per pulire/asciugare
  3. acqua tiepida
  4. un sistema di raccolta nuovo
  5. se necessario, usare le forbici per ritagliare il foro della placca della dimensione corretta

## Sistema monopezzo



Mentre con una mano tenete la pelle tesa, con l'altra staccate sacca e placca delicatamente.



Pulite lo stoma e la pelle circostante con un panno inumidito con acqua tiepida e poi asciugate con cura.



Usate l'apposita guida per rilevare la dimensione e la forma dello stoma. Se necessario, adattate con le forbici il foro della placca alla grandezza dello stoma.



Rimuovete la pellicola protettiva prima dell'applicazione.



Piegate la placca e posizionate la metà inferiore proprio sotto lo stoma, poi fatela aderire alla cute circostante.



Procedendo dal basso verso l'alto, esercitate una leggera pressione dal centro verso l'esterno, fino a quando non si è sicuri della completa adesione.



**Per le sacche ileo** assicuratevi che il sistema di chiusura della sacca sia ben chiuso. Operazione conclusa.

## Sistema due pezzi



Mentre con una mano tenete la pelle tesa, con l'altra staccate la placca delicatamente.



Usate l'apposita guida per rilevare la dimensione e la forma dello stoma. Se necessario, adattate con le forbici il foro della placca alla grandezza dello stoma.




Rimuovete la pellicola protettiva e applicate la placca sulla cute partendo dal basso.



Esercitate una leggera pressione dal centro della placca verso l'esterno fino a quando non siete sicuri della completa adesione.



Premete la sacca sulla placca. Inserendo le dita tra la flangia e la placca assicuratevi del corretto aggancio (si sentirà un click). **Per le sacche ileo** assicuratevi che il sistema di chiusura della sacca sia ben chiuso prima di agganciarla alla placca.

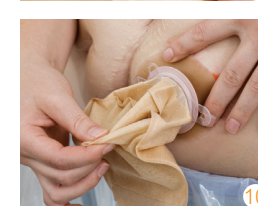

Verificate il corretto aggancio tirando leggermente la sacca.



Operazione conclusa.

