

Changement de poche à domicile

Poches de colostomie 1 et 2 pièces



Stoma
Skin
Soul



Les produits Dansac™ sont conçus pour être faciles à utiliser et pour aider à maintenir une peau naturellement saine. Préserver la santé de la peau péristomiale peut vous aider à vous sentir plus à l'aise et plus confiant dans tout ce que vous faites.



Conseils pour la santé de la peau

La zone autour de la stomie, sur laquelle est collée votre protecteur cutané, est appelée zone péristomiale.

Il est important de veiller à ce que cette zone soit propre et protégée des effluents de la stomie.

La stomie est rouge et humide. Elle n'a pas d'extrémité nerveuse et ne ressent donc rien.

Il est normal de voir un peu de sang sur votre lingette douce lorsque vous nettoyez la zone autour de la stomie.

Préparez le matériel suivant:

- un sac poubelle
- des lingettes sèches pour le nettoyage/séchage
- de l'eau tiède pour le nettoyage
- une nouvelle poche, un nouveau protecteur cutané ou les deux
- une paire de ciseaux pour découper le protecteur cutané (si nécessaire)
- tout autre accessoire que vous utilisez éventuellement



Humidifiez quelques lingettes sèches avec de l'eau tiède. Nettoyez soigneusement la stomie ainsi que la peau péristomiale.



Il est important que la peau péristomiale soit totalement sèche avant d'appliquer un nouveau protecteur cutané ou une nouvelle poche.

Changer une poche 1 pièce



Après avoir mesuré votre stomie, utilisez le guide de stomie pour reporter la taille et la forme de votre stomie sur le guide de découpe du protecteur cutané.



Découpez le protecteur cutané comme mesuré avec le guide de stomie.



Ajustez la découpe du trou central à l'aide d'une paire de ciseaux de petite taille et veillez à suivre le contour extérieur des marques.



Utilisez vos doigts pour appliquer et retirer le protecteur cutané.



Quelques lingettes humides peuvent aider à humidifier les bords du protecteur cutané.



Retirez prudemment la poche. Veillez à tendre la peau du ventre en appuyant d'une main dessus tout en décollant prudemment le protecteur cutané. Après avoir retiré la poche, nettoyez la peau péristomiale à l'aide d'une lingette humidifiée avec de l'eau tiède et séchez-la soigneusement.



Pour appliquer la nouvelle poche, retirez le film protecteur du protecteur cutané adhésif directement avant l'application.




Appliquez la poche en positionnant le protecteur cutané sur la peau juste en dessous de votre stomie. Avec vos doigts, appuyez délicatement sur le protecteur cutané afin de vous assurer qu'il est bien fixé.



Lavez-vous les mains soigneusement après le changement de poche.

Changer une poche 2 pièces

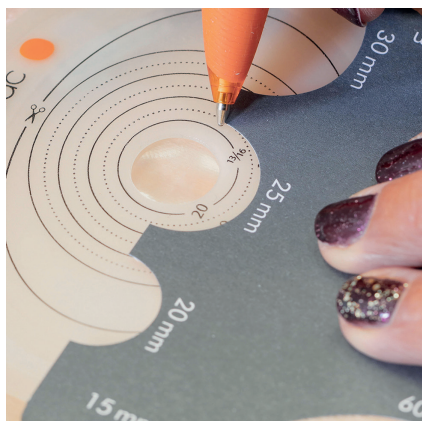

Après avoir mesuré votre stomie, utilisez le guide de stomie pour reporter la taille et la forme de votre stomie sur le guide de découpe du protecteur cutané.



Ajustez la taille du trou central prédécoupé à l'aide d'une paire de petits ciseaux et veillez à suivre le contour extérieur des anneaux de guidage visuel. Veillez à ce que le trou corresponde bien au contour de votre stomie. Découpez le protecteur cutané comme mesuré avec le guide de stomie.




Retirez prudemment la poche. Veillez à tendre la peau du ventre en appuyant d'une main dessus tout en décollant prudemment le protecteur cutané. Après avoir retiré la poche, nettoyez la peau péristomiale à l'aide d'une lingette humidifiée avec de l'eau tiède et séchez-la soigneusement.



Pour appliquer la nouvelle poche, retirez le film protecteur du protecteur cutané adhésif directement avant l'application.



Positionnez le protecteur cutané au-dessus de votre stomie. Appuyez délicatement sur le protecteur cutané et lissez de l'intérieur vers l'extérieur avec vos doigts pour vous assurer qu'il est bien fixé.

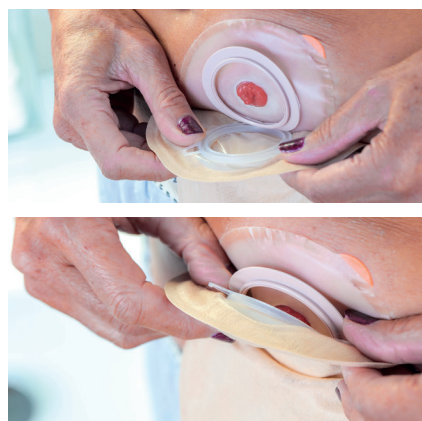

Encliquez la poche dans le protecteur cutané. Appuyez avec les doigts sur tout le pourtour afin de fixer la poche correctement sur le protecteur cutané.



Vérifiez de nouveau si la poche est bien connectée à l'anneau du protecteur cutané en tirant doucement sur la poche.



Lavez-vous les mains soigneusement après le changement de poche.

Vous trouverez d'autres informations concernant nos poches et des échantillons à commander en ligne sur notre site www.dansac.ch

Conseils pour les soins quotidiens de la stomie

Mesurez régulièrement votre stomie

Il est possible que votre stomie soit gonflée immédiatement après l'opération ainsi que dans les semaines qui suivent. Le gonflement diminuera progressivement, c'est pourquoi il est important de mesurer fréquemment la taille de votre stomie. Un guide de mesure est joint à chaque boîte de poches. Une bonne pratique consiste à mesurer régulièrement votre stomie au cours des 6 à 8 premières semaines. Contactez votre stomathérapeute si vous avez besoin d'aide.

Santé de la peau

La santé de la peau autour de la stomie (peau péristomiale) est importante. En cas de problèmes avec la peau péristomiale (démangeaisons, rougeurs ou irritations), il se peut qu'il y ait un suintement des effluents de la stomie sur la peau. Vous devrez peut-être contacter votre stomathérapeute si le problème persiste.



Être à l'aise dans sa peau

Liberty Medical Switzerland AG

Dansac Suisse
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf
www.dansac.ch

Contact pour les utilisateurs et leurs proches

Téléphone: 00800 55 38 39 (appel gratuit)

Horaires d'ouverture du service client:

Du lundi au jeudi: 08 h 00 - 12 h 00 et 13 h 00 - 17 h 00
Vendredi: 08 h 00 - 12 h 00 et 13 h 00 - 16 h 00
info@dansac.ch

INDICATION: Ce produit fait partie d'un système de poches de stomie 1 ou 2 pièces destiné à recevoir les effluents d'une stomie (p. ex. colostomie ou iléostomie) ou d'une ouverture de la peau (p. ex. blessure ou fistule).

MISES EN GARDE (PROTECTEUR CUTANÉ ET POCHE): La réutilisation d'un produit à usage unique peut entraîner un risque pour l'utilisateur, notamment une mauvaise adhérence. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent endommager le produit. Cela peut entraîner des odeurs désagréables ou des fuites. Assurez-vous en suivant les instructions que le produit est bien ajusté autour de votre stomie. En cas d'application incorrecte du produit, des suintements et des lésions cutanées peuvent survenir (p. ex. irritation, gerçure, éruption cutanée ou rougeur). Cela peut réduire la durée d'utilisation de votre produit.

REMARQUES (PROTECTEUR CUTANÉ ET POCHE): Pour garantir une bonne adhérence, appliquez le produit sur une peau intacte, propre et sèche. N'utilisez pas d'huiles ni de lotions. Ces produits peuvent réduire l'adhérence du protecteur cutané. L'ajustement du produit est affecté par de nombreux facteurs, tels que la nature de la stomie, les effluents de la stomie, l'état de la peau et les contours abdominaux. Contactez votre stomathérapeute pour obtenir des conseils sur les systèmes de poches de stomie ou en cas d'irritations cutanées. En cas de blessure grave (incident) liée à l'utilisation du produit, contactez le distributeur ou fabricant local, ainsi que l'autorité compétente de votre région. Pour davantage d'informations, consultez le site www.dansac.com/authority ou contactez le distributeur de votre région.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ: Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information générale et ne sont pas destinées à servir de conseil médical. Cette brochure ne doit en aucun cas non plus être utilisée pour obtenir une aide médicale urgente. En cas d'urgence médicale, vous devez immédiatement consulter un médecin. Veuillez consulter notre site web pour les informations les plus récentes, car les directives peuvent parfois changer.

Avant utilisation, veuillez lire le mode d'emploi pour prendre connaissance des informations concernant l'usage prévu, les contre-indications, les avertissements, les précautions et autres instructions. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre professionnel de la santé.

Cette utilisatrice a reçu une compensation de la part de Dansac pour son témoignage.

Dansac, le logo de Dansac, NovaLife et TRE sont des marques déposées de Dansac A/S.
© 2026 Dansac A/S

