

Cambio del sistema a casa

Sistema per colostomia in 1 e 2 pezzi



Stoma
Skin
Soul



I prodotti Dansac™ sono destinati a favorire la semplicità d'uso e a mantenere sana la pelle che circonda lo stoma, per sentirsi meglio e più sicuri.



Consigli per la salute della pelle

L'area che circonda lo stoma su cui è posizionata la placca adesiva è detta area peristomale. È importante che quest'area cutanea venga mantenuta pulita e protetta dalle fuoriuscite di materiale dallo stoma.

Lo stoma è rosso e umido; non contiene terminazioni nervose e quindi non ha sensibilità.

È normale vedere po' di sangue sul panno morbido quando si pulisce l'area peristomale.

Ti serviranno:

- sacchetto per lo smaltimento
- panni asciutti per pulire e asciugare
- acqua calda per la pulizia
- una nuova sacca e/o placca adesiva
- forbici per tagliare la placca adesiva (se necessario)
- eventuali altri accessori



Inumidisci qualche panno asciutto in acqua tiepida. Pulisci accuratamente lo stoma e la cute circostante.



È importante che la pelle che circonda lo stoma sia completamente asciutta prima di applicare una nuova placca adesiva e/o una nuova sacca.

Cambio di una sacca monopezzo



Dopo aver misurato lo stoma, usa la guida per lo stoma per trasferire le dimensioni e la forma dello stoma sulla guida di taglio della placca adesiva.



Taglia la placca adesiva nelle dimensioni rilevate con la guida dello stoma.



Adatta il foro iniziale con delle forbici piccole, avendo cura di seguire il bordo esterno della traccia.



Usa le dita per applicare e rimuovere la placca adesiva.



Può essere utile utilizzare qualche panno umido per inumidire i bordi della placca adesiva.



Rimuovi delicatamente la sacca: tendi la pelle sull'addome premendo con una mano, mentre con l'altra togli con cura la placca adesiva. Dopo la rimozione, pulisci la pelle intorno allo stoma con acqua calda e asciugala accuratamente.



Per applicare la nuova sacca, togli la pellicola protettiva dalla placca adesiva immediatamente prima dell'applicazione.




Applica la sacca posizionando la placca adesiva sulla pelle proprio sotto lo stoma. Premi la placca adesiva con le dita per accertarti che sia fissa nella sua posizione.



Dopo il cambio del sistema, lavati accuratamente le mani.

Cambio di una sacca a due pezzi

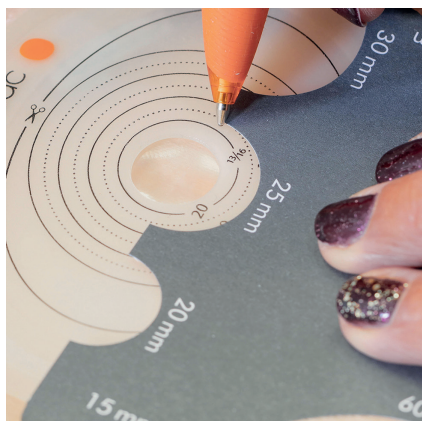

Dopo aver misurato lo stoma, usa la guida per lo stoma per trasferire le dimensioni e la forma dello stoma sulla guida di taglio della placca adesiva.



Adatta il foro iniziale con delle forbici piccole e affilate, avendo cura di seguire il bordo esterno della traccia. Fa in modo che il foro si adatti bene allo stoma. Taglia la placca adesiva nelle dimensioni rilevate con la guida dello stoma.




Rimuovi delicatamente la sacca: tendi la pelle sull'addome premendo con una mano, mentre con l'altra togli con cura la placca adesiva. Dopo la rimozione, pulisci la pelle intorno allo stoma con acqua calda e asciugala accuratamente.



Per applicare la nuova sacca adesiva, togli la pellicola protettiva dalla placca adesiva immediatamente prima dell'applicazione.



Posizionare la placca adesiva al di sopra dello stoma. Premi la placca adesiva con le dita dal centro al bordo, per accertarti che sia ben fissa nella sua posizione.

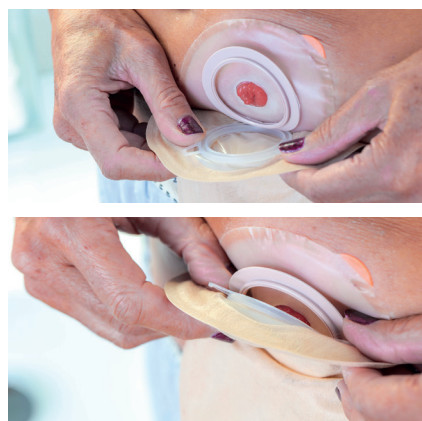

Premi la sacca sulla placca adesiva. Passa le dita tutt'intorno esercitando una lieve pressione, per accertarti che la sacca sia agganciata correttamente alla placca.



Controlla di nuovo che la sacca sia saldamente collegata all'anello di arresto, tirando delicatamente la sacca.



Dopo il cambio del sistema, lavati accuratamente le mani.

Per ulteriori informazioni o campioni delle nostre sacche, visitare il sito web www.dansac.ch

Suggerimenti per la cura quotidiana dello stoma

Misura periodicamente lo stoma

Subito dopo l'intervento chirurgico e nelle settimane successive, lo stoma potrebbe essere gonfio. Il gonfiore si riduce gradualmente, quindi è importante misurare periodicamente le dimensioni dello stoma. A questo scopo, ciascuna confezione di sacche comprende una guida per la misurazione. Si raccomanda di misurare periodicamente lo stoma nelle prime 6-8 settimane.

Se hai bisogno di aiuto, rivolgiti alla stomaterapista.

La salute della pelle

È importante che la pelle che circonda lo stoma rimanga in buone condizioni. Eventuali disturbi nell'area cutanea che circonda lo stoma, prurito, arrossamento o lesioni, potrebbero indicare la fuoriuscita e l'infiltrazione di materiale dallo stoma sulla pelle. Se il problema persiste, rivolgiti alla stomaterapista.



Sentirsi bene nella propria pelle

Liberty Medical Switzerland AG

Dansac Svizzera
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf
www.dansac.ch

Recapiti per gli utilizzatori e i loro familiari

Telefono: 00800 55 38 39 (numero gratuito)

Orari del Servizio di assistenza:

Lunedì - Giovedì: ore 08:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00
Venerdì: ore 08:00 - 12:00 e 13:00 - 16:00
info@dansac.ch

INDICAZIONE: Questo prodotto fa parte di un sistema monopezzo o a due pezzi, destinato a raccogliere le secrezioni di uno stoma (ad es. colostoma o ileostoma) oppure di una apertura cutanea (ad es. ferita o fistola).

AVVERTENZE (PLACCA ADESIVA E SACCA): Il riutilizzo di un prodotto monouso può portare a rischi (ad es. cattiva aderenza) per l'utilizzatore. Rigenerazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere il prodotto. Ciò può provocare odori sgradevoli o perdite. Accertarsi, seguendo le istruzioni, che il sistema di raccolta si adatti correttamente allo stoma. Il montaggio errato del sistema può causare infiltrazioni e danni alla pelle (ad es. irritazioni, screpolature, eruzioni o arrossamenti cutanei). Ciò può a sua volta accorciare la vita utile del sistema.

OSSERVAZIONI (PLACCA ADESIVA E SACCA): Per un'aderenza ottimale, applicare il prodotto su pelle pulita, asciutta e integra. Non usare oli o lozioni. Questi prodotti possono compromettere l'aderenza del sistema. L'adattamento ottimale del sistema dipende da molti fattori, come le condizioni e lo scarico dello stoma, le condizioni cutanee e la conformazione corporea. Se hai bisogno di assistenza per la gestione del sistema stoma/sacca o in caso di irritazioni cutanee, rivolgiti al tuo personale di cura dello stoma. In caso di lesioni gravi (eventi) legate all'uso del prodotto, rivolgiti al distributore locale o al produttore e alle autorità locali competenti. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.dansac.com/authority, o presso il proprio distributore locale.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Le informazioni contenute in questo non vanno intese come una consulenza medica e non sostituiscono le raccomandazioni del proprio medico o di altri medici. Questo opuscolo non deve nemmeno essere utilizzato per cercare aiuto in caso di emergenza medica. In caso di emergenza medica, rivolgiti immediatamente di persona a un medico. Per informazioni aggiornate consulta il nostro sito web, perché talvolta le disposizioni possono cambiare.

Prima dell'impiego leggi le istruzioni per l'uso, contenenti informazioni su uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni. Se necessario, rivolgiti al personale sanitario per ulteriori informazioni.

Questa utilizzatrice ha ricevuto da Dansac un compenso per la propria attività come testimonial.

Dansac, il logo Dansac, NovaLife e TRE sono marchi registrati di Dansac A/S.

© 2026 Dansac A/S

