

Cambio del sistema a casa

Sistema per urostomia in 1 e 2 pezzi



Stoma
Skin
Soul



I prodotti Dansac™ sono destinati a favorire la semplicità d'uso e a mantenere sana la pelle che circonda lo stoma, per sentirsi meglio e più sicuri.



Consigli per la salute della pelle

L'area che circonda lo stoma su cui è posizionata la placca adesiva è detta area peristomale.

È importante che quest'area cutanea venga mantenuta pulita e protetta dalle fuoriuscite di materiale dallo stoma. Lo stoma è rosso e umido; non contiene terminazioni nervose e quindi non ha sensibilità. È normale vedere po' di sangue sul panno morbido quando si pulisce l'area peristomale.

Se sei preoccupato/a per la quantità di sangue, rivolgiti al personale sanitario.

Ti serviranno:

- sacchetto per lo smaltimento
- panni asciutti per pulire e asciugare
- acqua calda per la pulizia
- una nuova sacca e/o placca adesiva
- forbici per tagliare la placca adesiva (se necessario)
- eventuali altri accessori




Inumidisci qualche panno asciutto in acqua calda. Pulisci accuratamente lo stoma e la cute circostante.

Cambio del sistema monopezzo



È importante che la pelle che circonda lo stoma sia completamente asciutta prima di applicare una nuova placca adesiva e/o una nuova sacca.

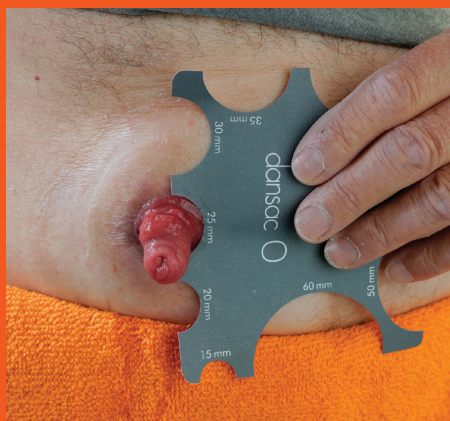

Dopo aver misurato lo stoma, usa la guida per lo stoma per trasferire le dimensioni e la forma dello stoma sulla guida di taglio della placca adesiva.



Taglia la placca adesiva nelle dimensioni rilevate con la guida dello stoma.



Per applicare la nuova placca adesiva, toglila pellicola protettiva immediatamente prima dell'applicazione.



Applica la sacca posizionando la placca adesiva sulla pelle proprio sotto lo stoma.



Premi la placca adesiva con le dita per accertarti che sia fissa nella sua posizione.



La sacca è saldamente nella posizione corretta.



Verifica che il rubinetto della sacca sia chiuso. Il rubinetto è chiuso quando non si vede o non si percepisce la piccola protuberanza bianca rialzata quando la sacca è a contatto con il corpo.



Dopo il cambio lavati le mani.

Cambio del sistema a due pezzi



Dopo aver misurato lo stoma, usa la guida per lo stoma per trasferire le dimensioni e la forma dello stoma sulla guida di taglio della placca adesiva.



Adatta il foro iniziale con delle forbici piccole, avendo cura di seguire il bordo esterno della traccia. Fa in modo che il foro si adatti bene allo stoma. Taglia la placca adesiva nelle dimensioni rilevate con la guida dello stoma.



Rimuovi delicatamente la sacca: tendi la pelle sull'addome premendo con una mano, mentre con l'altra togli con cura la placca adesiva.



Dopo la rimozione, pulisci la pelle intorno allo stoma con acqua calda e asciugala accuratamente.



Per applicare la nuova placca adesiva, togli la pellicola protettiva dalla placca adesiva immediatamente prima dell'applicazione.




Posizionare la placca adesiva al di sopra dello stoma. Premi la placca adesiva con le dita dal centro al bordo, per accertarti che sia fissa nella sua posizione.



Premi la sacca sulla placca adesiva. Passa le dita tutt'intorno esercitando una lieve pressione, per accertarti che la sacca sia agganciata correttamente alla placca adesiva.



Controlla di nuovo che la sacca sia saldamente collegata all'anello della placca adesiva, tirando delicatamente la sacca.

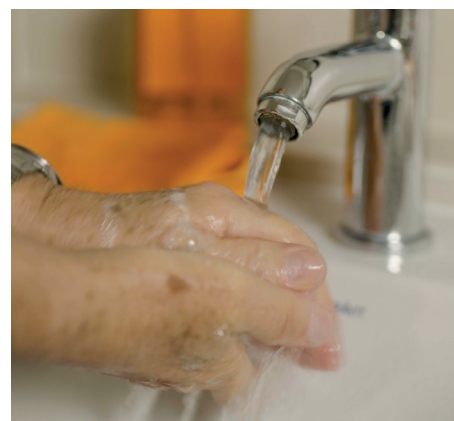

Dopo il cambio del sistema, lavati accuratamente le mani.

Suggerimenti per la cura quotidiana dello stoma

Misura periodicamente lo stoma

Subito dopo l'intervento chirurgico e nelle settimane successive, lo stoma potrebbe essere gonfio. Il gonfiore si riduce gradualmente, quindi è importante misurare periodicamente le dimensioni dello stoma. A questo scopo, ciascuna confezione di sacche comprende una guida per la misurazione. Si raccomanda di misurare periodicamente lo stoma nelle prime 6 settimane. Se hai bisogno di aiuto, rivolgiti al personale sanitario.

La salute della pelle

È importante che la pelle che circonda lo stoma rimanga in buone condizioni. Eventuali disturbi nell'area cutanea che circonda lo stoma, prurito, arrossamento o lesioni, potrebbero indicare la fuoriuscita e l'infiltrazione di materiale dallo stoma. Se il problema persiste, rivolgiti al personale sanitario.



Sentirsi bene nella propria pelle

Liberty Medical Switzerland AG

Dansac Svizzera
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf
www.dansac.ch

Recapiti per gli utilizzatori e i loro familiari

Telefono: 00800 55 38 39 (numero gratuito)

Orari del Servizio di assistenza:

Lunedì - Giovedì: ore 08:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00
Venerdì: ore 08:00 - 12:00 e 13:00 - 16:00
info@dansac.ch

AVVERTENZE: Il riutilizzo di un prodotto monouso può portare a rischi (ad es. cattiva aderenza) per gli utilizzatori. Rigenerazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere il prodotto. Ciò può provocare odori sgradevoli o perdite. Accertarsi, seguendo le istruzioni, che il sistema di raccolta si adatti correttamente allo stoma. Il montaggio errato del sistema può causare infiltrazioni e danni alla pelle (ad es. irritazioni, screpolature, eruzioni o arrossamenti cutanei). Ciò può a sua volta accorciare la vita utile del sistema.

OSSERVAZIONI: La persona raffigurata sulla copertina dell'opuscolo non è la stessa raffigurata per il cambio del sistema. Per un'aderenza ottimale, applicare il prodotto su pelle pulita, asciutta e integra. Non usare oli o lozioni. Questi prodotti possono compromettere l'aderenza del sistema. Il muco in eccesso proveniente da un urostoma può rallentare lo svuotamento della sacca.

L'adattamento ottimale del sistema dipende da molti fattori, come le condizioni e le secrezioni dello stoma, le condizioni cutanee e la conformazione corporea. Se hai bisogno di assistenza per la gestione dello stoma o in caso di irritazioni cutanee, rivolgiti al tuo personale di cura dello stoma. In caso di lesioni gravi (eventi) legate all'uso del prodotto, rivolgiti al distributore locale o al produttore e alle autorità locali competenti. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.dansac.com/authority, o presso il proprio distributore locale.

Le informazioni contenute in questo non vanno intese come una consulenza medica e non sostituiscono le raccomandazioni del proprio medico o di altri medici. Per informazioni aggiornate consulta il nostro sito web, perché talvolta le disposizioni possono cambiare.

Le opinioni qui riportate si riferiscono al testimonial mostrato. Queste opinioni rappresentano le sue esperienze vissute, ma sono uniche e individuali per ciascun utilizzatore. Questo testimonial ha ricevuto un compenso corrispondente da Dansac.

Prima dell'impiego leggi le istruzioni per l'uso, contenenti informazioni su uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni.

Dansac, il logo Dansac, NovaLife e TRE sono marchi registrati di Dansac A/S.
©2026 Dansac A/S

