

Anwendung des Dansac TRE™ Hautschutzrings



Anwendung des TRE Hautschutzrings



Weitere Informationen unter www.dansac.at / www.dansac.ch / www.dansac.de

WARNUNGEN: Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts kann zu Risiken (wie etwa schlechter Haftung) für den Anwender führen. Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können das Produkt beeinträchtigen. Dies kann zu unangenehmen Gerüchen und Undichtigkeiten führen.

HINWEISE: Bitte beachten Sie, dass auf dieser Broschüre mehrere Personen bei der Anwendung des Produkts dargestellt sind. Um eine gute Haftung zu gewährleisten, tragen Sie den Ring auf saubere, trockene und intakte Haut auf. Verwenden Sie keine Öle oder Lotionen. Diese Produkte können die Haftung beeinträchtigen. Die Passform des Produkts wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie z. B. der Stomaanlage, der Stomaausscheidung, dem Hautzustand und den Bauchkonturen. Das Produkt kann zugeschnitten, gedehnt oder kombiniert werden, um die bessere Anpassung eines Stomabeutelsystems an die Haut zu unterstützen. Sollten Sie Hilfe mit dem Stomabeutelsystem oder Hautreizungen benötigen, kontaktieren Sie Ihre zuständige Stomapflegekraft oder eine medizinische Pflegekraft. Setzen Sie sich im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in Verbindung mit der Verwendung des Produkts bitte mit Ihrem lokalen Händler oder dem Hersteller sowie Ihrer zuständigen Behörde vor Ort in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.dansac.com/authority, oder Sie setzen sich mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Das Dansac Logo und TRE sind Markenzeichen der Dansac A/S.

© 2021 Dansac A/S

CE

dansac 