

Versorgungswechsel zu Hause

1- und 2-teilige Urostomieversorgung



Stoma
Skin
Soul



Dansac™ Produkte sind für die einfache Anwendung und zur Erhaltung der natürlich gesunden Haut konzipiert. Wenn Sie die Haut um Ihr Stoma herum gesund halten, können Sie sich bei all Ihren Aktivitäten wohler und sicherer fühlen.



Empfehlungen zur Hautgesundheit

Der Bereich um Ihr Stoma, auf dem die Hautschutzplatte haftet, wird als peristomaler Bereich bezeichnet. Es ist wichtig, diesen Hautbereich sauber zu halten und vor Stomaausscheidungen zu schützen. Das Stoma ist rot und feucht. Es hat keine Nervenenden und daher keine Empfindung. Es ist normal, wenn beim Reinigen des peristomalen Bereichs auf dem weichen Tuch etwas Blut zu sehen ist. Wenn Sie sich jedoch Sorgen über die Blutmenge machen, wenden Sie sich bitte an Ihre Pflegefachkraft.

Sie benötigen Folgendes:

- Entsorgungsbeutel
- Trockene Tücher zum Reinigen und Trocknen
- Warmes Wasser zum Reinigen
- Neuen Beutel und/oder neue Hautschutzplatte
- Schere zum Zuschneiden der Hautschutzplatte (falls erforderlich)
- Eventuelles weiteres Zubehör




Befeuchten Sie einige trockene Tücher mit warmem Wasser. Reinigen Sie das Stoma und die umgebende Haut gründlich.

Wechseln der einteiligen Versorgung



Es ist wichtig, dass die Haut um das Stoma herum vollständig trocken ist, bevor Sie eine neue Hautschutzplatte und/oder einen neuen Beutel anbringen.

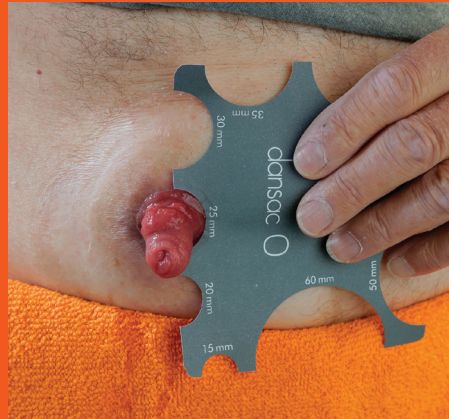

Nachdem Sie Ihr Stoma vermessen haben, übertragen Sie die Grösse und Form Ihres Stomas mit der Stoma-schablone auf die Schnitovorlage der Hautschutzplatte.



Schneiden Sie die Hautschutzplatte entsprechend den Massen der Stoma-schablone zu.



Um die neue Hautschutzplatte anzubringen, entfernen Sie die Schutzfolie unmittelbar vor dem Anbringen.



Bringen Sie den Beutel an, indem Sie die Hautschutzplatte auf der Haut direkt unterhalb des Stomas positionieren.



Drücken Sie die Hautschutzplatte mit den Fingern an, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt ist.



Der Beutel ist sicher in Position.



Vergewissern Sie sich, dass der Ablasshahn des Beutels geschlossen ist. Dies ist der Fall, wenn Sie den erhabenen weissen Tropfen nicht sehen oder fühlen, wenn der Beutel am Körper anliegt.



Waschen Sie sich nach dem Wechsel die Hände.

Wechseln der zweiteiligen Versorgung



Nachdem Sie Ihr Stoma vermessen haben, übertragen Sie die Grösse und Form Ihres Stomas mit der Stomaschablone auf die Schnitovorlage der Hautschutzplatte.



Passen Sie das Startloch mit einer kleinen Schere an und achten Sie darauf, dass Sie der Aussenkante der Markierung folgen. Sorgen Sie dafür, dass das Loch gut zu Ihrem Stoma passt. Schneiden Sie die Hautschutzplatte entsprechend den Massen der Stomaschablone zu.



Entfernen Sie vorsichtig den Beutel. Ziehen Sie die Haut am Bauch straff, indem Sie mit einer Hand darauf drücken, während Sie die Hautschutzplatte vorsichtig entfernen.



Reinigen Sie nach dem Entfernen die Haut um das Stoma mit warmem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.



Um die neue Hautschutzplatte anzubringen, entfernen Sie die Schutzfolie von der Hautschutzplatte unmittelbar vor dem Anbringen.




Positionieren Sie die Hautschutzplatte über dem Stoma. Drücken Sie die Hautschutzplatte mit den Fingern von der Mitte zum Rand hin an, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.



Rasten Sie den Beutel auf der Hautschutzplatte ein. Sorgen Sie durch Andrücken mit den Fingern dafür, dass der Beutel rundherum an der Hautschutzplatte befestigt ist.



Vergewissern Sie sich nochmals, dass der Beutel fest mit dem Hautschutzplattenring verbunden ist, indem Sie vorsichtig am Beutel ziehen.

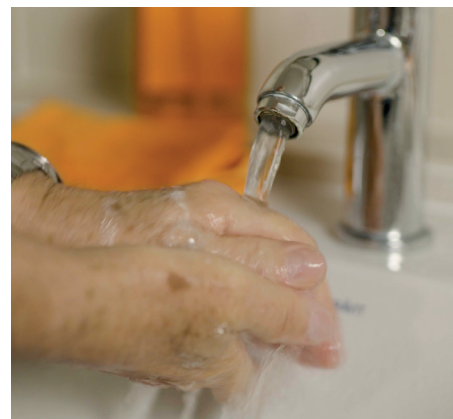

Waschen Sie sich nach dem Versorgungswechsel gründlich die Hände.

Tipps für die tägliche Stomapflege

Messen Sie Ihr Stoma regelmässig

Es kann sein, dass Ihr Stoma unmittelbar nach der Operation und in den darauffolgenden Wochen geschwollen ist. Diese Schwellung geht allmählich zurück. Daher ist es wichtig, dass Sie die Grösse Ihres Stomas regelmässig messen. Hierzu wird eine Messschablone in jeder Beutelpackung mitgeliefert. Es empfiehlt sich, in den ersten 6 Wochen das Stoma regelmässig zu messen. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr medizinisches Fachpersonal.

Hautgesundheit

Es ist wichtig, dass die Haut um das Stoma herum in gutem Zustand bleibt. Wenn es zu Beschwerden an der Haut um das Stoma herum kommt, wenn sie juckt, gerötet ist oder wund wird, kann dies auf Unterwanderung von Stomaausscheidungen hinweisen. Wenden Sie sich bitte an Ihr medizinisches Fachpersonal, wenn das Problem weiterhin besteht.



Wohlfühlen in der eigenen Haut

Liberty Medical Switzerland AG

Dansac Schweiz
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf
www.dansac.ch

Kontaktdaten für Anwender:innen und Angehörige

Telefon: 00800 55 38 39 (gebührenfrei)

Kundenservice Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr
info@dansac.ch

WARNHINWEISE: Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts kann zu Risiken (wie etwa schlechter Haftung) für die Anwender:innen führen. Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können das Produkt beeinträchtigen. Dies kann zu unangenehmen Gerüchen oder Undichtigkeiten führen. Stellen Sie anhand der Anweisungen sicher, dass Ihre Versorgung rund um Ihr Stoma richtig sitzt. Bei fehlerhafter Anbringung der Versorgung können Unterwanderungen und Hautschäden (z.B. Irritationen, rissige Haut, Ausschläge oder Rötungen) auftreten. Dies kann wiederum die Nutzungsdauer Ihrer Versorgung verkürzen.

ANMERKUNGEN: Bitte beachten Sie, dass die Person, die auf der Titelseite der Broschüre abgebildet ist, nicht mit der Person identisch ist, die für den Versorgungswechsel abgebildet wurde. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, wenden Sie das Produkt auf sauberer, trockener und unbeschädigter Haut an. Verzichten Sie auf Öle oder Lotionen. Diese Produkte können die Haftung Ihrer Versorgung beeinträchtigen. Überschüssiger Schleim aus einem Urostoma kann dazu führen, dass der Beutel langsamer als erwartet entleert wird.

Der optimale Sitz der Versorgung hängt von zahlreichen Faktoren, wie etwa der Beschaffenheit und Ausscheidung des Stomas, dem Zustand der Haut und den Körperkonturen ab. Sollten Sie Hilfe mit der Stomaversorgung oder bei Hautreizungen benötigen, kontaktieren Sie Ihre zuständige Stomapflegekraft. Setzen Sie sich, im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in Verbindung mit der Verwendung des Produkts, bitte mit Ihrem lokalen Händler oder dem Hersteller sowie Ihrer zuständigen Behörde vor Ort in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.dansac.com/authority, oder Sie setzen sich mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung.

Die Informationen in dieser Broschüre sind nicht als medizinische Beratung gedacht und sollen die Empfehlungen Ihres eigenen Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte nicht ersetzen. Da sich Bestimmungen ab und zu ändern, besuchen Sie bitte unsere Internetseite für die aktuellsten Informationen.

Die vorliegenden Meinungen beziehen sich auf das abgebildete Testimonial. Diese Meinungen sind repräsentativ für deren Erfahrungen, aber einzigartig und individuell für jede/n AnwenderIn. Dieses Testimonial erhielt von Dansac eine entsprechende Vergütung.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen.

Dansac, das Dansac Logo, NovaLife und TRE sind Markenzeichen der Dansac A/S.
©2026 Dansac A/S

