


Anneau protecteur cutané Dansac TRE: la gamme

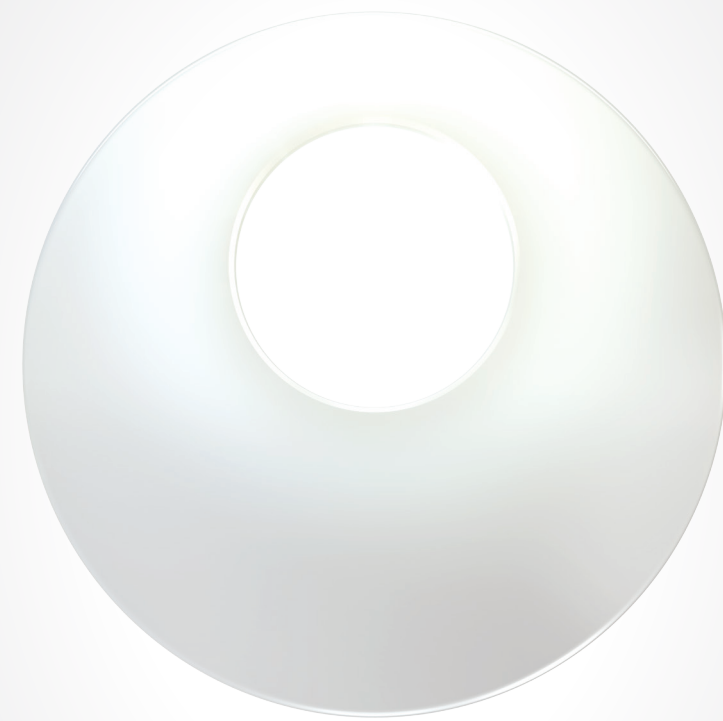

L'anneau protecteur cutané Dansac TRE fait plus – grâce à ses trois niveaux de protection, adhérence, absorption et équilibre pH, il contribue à la santé naturelle de la peau.

DÉSIGNATION	TAILLE DE L'OUVERTURE	RÉF.	PHARMACODE	COND.
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture centrée	18 mm	072-48	732 47 92	10
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture excentrée	20 mm	071-20	732 47 57	30
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture excentrée	30 mm	071-30	732 47 63	30
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture excentrée	40 mm	071-40	732 47 86	30



Anneau protecteur cutané Dansac TRE

DANSAC TRE SEAL

Dansac • Bernstrasse 388 • 8953 Dietikon
Tél. 044 730 50 10 • E-mail : info@dansac.ch
www.dansac.ch www.estoma.ch

dansac
Dedicated to Stoma Care

dansac
Dedicated to Stoma Care

TROIS NIVEAUX DE PROTECTION POUR UNE PEAU SAINNE



Trois niveaux de protection élèvent la protection cutanée à autre niveau



Adhérence

Conçue pour assurer une étanchéité sûre et flexible de la stomie, afin de protéger la peau des effluents et faciliter l'enlèvement après utilisation.



Absorption

Aide à absorber l'excès d'humidité, afin de préserver l'équilibre naturel de la peau – sans que l'anneau perde sa forme ou son adhérence.



Equilibre pH

Conçu pour compenser les effets nuisibles pour la peau des enzymes digestives.

Une peau équilibrée grâce à la capacité tampon pH de l'anneau protecteur cutané Dansac TRE

Conserver le pH naturel de la peau permet de la protéger contre les lésions enzymatiques dues aux effluents de la stomie.

Les effluents de la stomie contiennent des enzymes digestives qui agressent les cellules cutanées. Ces enzymes sont particulièrement actives dans la zone de pH neutre. Si elles entrent en contact avec une peau saine, elles peuvent modifier son pH de telle sorte que les cellules cutanées deviennent vulnérables. Le résultat: des irritations cutanées.

Une peau saine est légèrement acide (pH 4-6). Le tampon pH de l'anneau protecteur cutané Dansac TRE conserve le pH de la peau saine et contribue à diminuer l'activité des enzymes digestives.

L'anneau protecteur cutané Dansac TRE - favorable à la peau, hostile aux enzymes digestives.



Voilà ce que disent les spécialistes des stomies sur l'anneau protecteur cutané Dansac TRE*:

«La facilité d'utilisation, la protection et la stabilité correspondent parfaitement aux besoins de mes patients.»

83%

des praticiens étaient très satisfaits de l'adhérence de l'anneau protecteur cutané Dansac TRE sur une peau péristomiale.

75%

des praticiens étaient très satisfaits de la résistance à l'érosion de l'anneau protecteur cutané Dansac TRE.

74%

des praticiens étaient très satisfaits de la capacité de l'anneau protecteur cutané Dansac TRE à préserver la santé d'une peau péristomiale.

* Les résultats proviennent d'une étude des pratiques de 70 stomathérapeutes en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et au Japon, dans le cadre de laquelle les personnes interrogées n'ont pas été rémunérées. Les données collectées ne proviennent pas d'une étude contrôlée ou randomisée. Les résultats le reflètent: pour chaque utilisateur, l'utilisation de l'anneau Dansac TRE fait partie du plan d'approvisionnement de la stomathérapie.